

吸入サポートアプリケーションのご案内

✓吸入サポートとは？

「ブデホル吸入粉末剤「JG」」を使用される患者さまの服薬支援をおこなうツールです。

• 吸入練習器を使ったトレーニング支援


スマートフォンで、吸入練習器の音をチェックします。「**正しく練習できたか**」確認できます。



• 服薬忘れ防止通知、服薬記録の支援

服薬情報の通知登録で、**服薬時間に通知メッセージの表示**をおこなうことができます。

服薬の記録、通院日の登録が可能です。

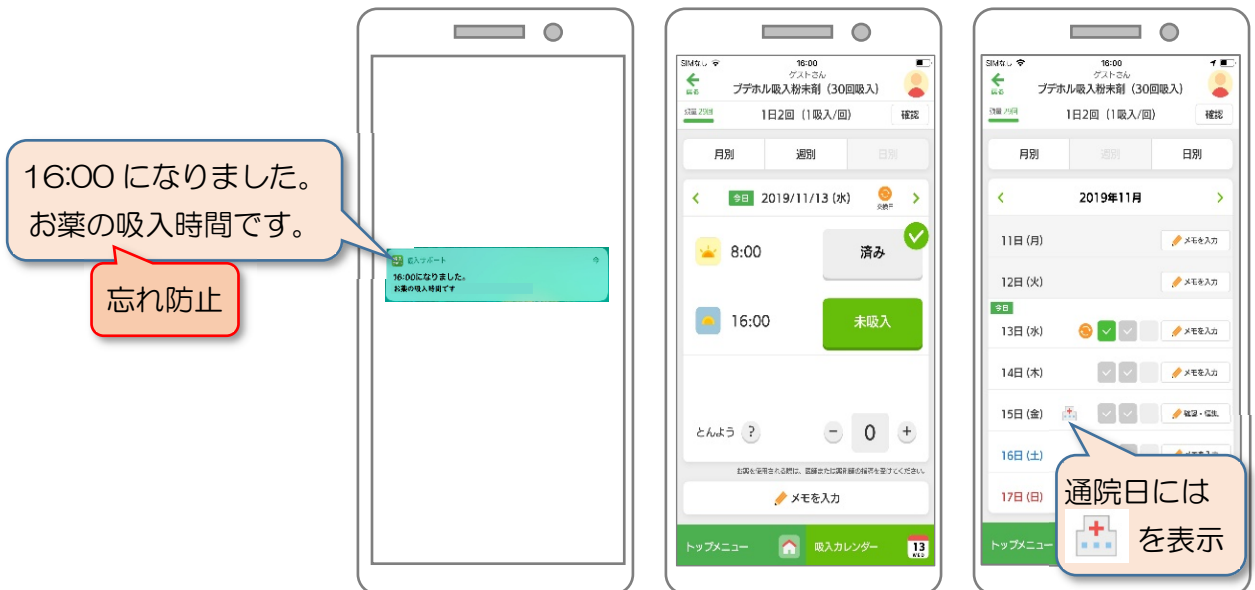

✓インストールの方法

- 二次元バーコードをカメラで読み取り、ご利用の端末にインストールをお願いします。



Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

- 対象 OS は下記の通り

iOS : 16 以上 iOS 15 以下では動作確認をおこなっておりません。

Android 12 以上 Android 11 以下では動作確認をおこなっておりません。

吸入練習器を使ったトレーニング

✓吸入サポートを起動し、[吸入トレーニング]を選択します。

[吸入トレーニング]を初めて起動したときは、**動画を見る必要**があります。



✓吸入トレーニングをおこなってみましょう。

吸入練習器を準備して、[トレーニングスタート]をしてください。

